PROTOCOLE ORTHO-K

1er RENDEZ-VOUS

DÉTERMINER LES LENTILLES D'ESSAI

1. Topographie:

Tutoriel « réussir ses topographies » sur les sites www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com

- Instiller 1 à 2 gouttes de solution de confort (AQUADROP+) afin de garantir un ménisque de larmes régulier
- Demander au patient de cligner 2-3 fois puis **d'ouvrir bien grand les yeux** pour avoir une surface de mesure maximale
- Vérifier la reproductibilité des topographies en faisant 4 prises par oeil et en comparant les mesures avec la kératométrie donnée par un auto-réfracteur
 - 2. Réfraction subjective précise
 - 3. Mesure du diamètre cornéen
 - 4. Validation des indications :

Pas de contre-indication | Réfraction dans les limites de fabrication Diamètre pupillaire < 4mm chez les adultes | Motivation du porteur

2^{ème} RENDEZ-VOUS

CONTRÔLE DE L'IMAGE FLUO et MANIPULATION

1. Contrôler l'image fluo : *voir au verso* 2. Valider la manipulation :

Tutoriel de manipulation sur les sites www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com



RENDEZ-VOUS DE SUIVI

Après la 1ère nuit

Le matin

À 10 nuits

Fin de journée

À 1 mois

Fin de journée

À 1 an

Fin de journée



Le porteur doit venir avec ses lentilles dans l'étui.

- 1. Bilan porteur : ressenti subjectif du porteur par rapport au traitement et à ses effets
- 2. Réfraction complémentaire (sans auto-réfractomètre)
- 3. Topographies
- 4. Contrôle de l'intégralité cornéenne à la lampe à fente
- 5. Images fluo: voir au verso
- 5. Validation de la manipulation et de l'observance :
 - Pose : lentille **remplie** de solution de confort AQUADROP+ **sans conservateur**, miroir à plat sur une table
 - Retrait : instiller 2 gouttes d'AQUADROP+ le matin au réveil, puis patienter 15 minutes avant de retirer les lentilles
 - Entretien : massage + oxydant (OXYClean) quotidien + déprotéinisation (ProCare) hebdomadaire



IMAGES FLUO DRL CHEZ LE MYOPE


Tutoriel « réussir ses images fluo » consultable sur les sites www.lentilledenuit.com ou www.precilens.com

• Contrôle de l'image fluo avant la 1ère nuit

- Instiller la fluorescéine à l'intérieur de la lentille avant la pose
 - Faire poser la lentille avec un miroir à plat sur la table

3 minutes les yeux fermés



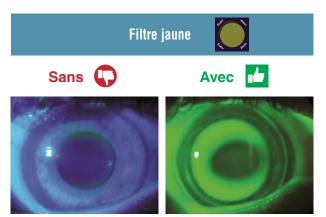





Plate



Validation de la fluo centrale chez le myope

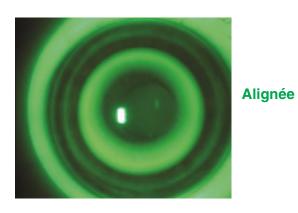




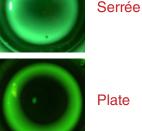



Alignée

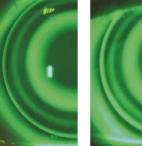




Validation de la fluo périphérique





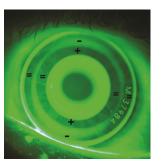

Assistance Technique:

Tel: 01 45 13 18 49 - Email: technique@precilens.com

