

UPOZORNENIA:

Kontaktné šošovky sú zdravotnícke pomôcky na opakované použitie pre jedného používateľa. Vydáva ich odborník na očné starostlivosť, ktorý musí používateľov informovať a zaškoliť v ich používaní.

Problémy spojené s nosením kontaktných šošoviek a produktmi starostlivosti o ne môžu spôsobiť vážne poškodenie očí. Preto je nevyhnutné dodržiavať pokyny lekára a pokyny na príbalových letákoch kontaktných šošoviek a prípravkov na starostlivosť o šošovky.

Zdravotnícky pracovník by mal používateľa informovať o nasledujúcich pokynoch na nosenie šošoviek:

- Pred prvým nasadením namočte šošovky do bežného čistiaceho roztoku a nechajte dokončiť čistiaci cyklus.
- Tvrdé kontaktné šošovky Precilens sú určené na denné nosenie a nesmú sa nosiť počas spánku.
- Po použití a pred opätovným použitím je potrebné šošovky vybrať, vyčistiť a dekontaminovať pomocou lekárskom odporúčaných prípravkov na starostlivosť o šošovky.
- Je potrebné dodržiavať termíny návštev naplánovaných lekárom, ktoré sú nevyhnutné na kontrolu a sledovanie adaptácie.
- Nikdy šošovky nevystavujte kontaktu s vodou z vodovodu.
- Nikdy nenoste kontaktné šošovky počas kúpania, sprchovania, plávania v bazéne alebo mori.
- Nenoste šošovky, ak existuje riziko vystavenia nebezpečným alebo dráždivým výparom.
- V prípade bolesti očí, nadmerného slzenia, zníženej ostrosti alebo začervenania očí je nevyhnutné šošovky vybrať a urýchlene kontaktovať lekára.

INDIKÁCIE:

Tvrde šošovky sú denné kontaktné šošovky na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu a presbyopie na pravidelne alebo nepravidelne zakrivenej rohovke (keratokonus, keratoplastika očnej rohovky alebo refrakčná chirurgia).

Kontaktné šošovky sa dajú prispôsobiť akémukoľvek pacientovi, pokiaľ si pacient uvedomuje, že ich nosenie je podobné noseniu okuliarov, no prispôbiť sa im môže byť niekedy náročné.

Na nosenie kontaktných šošoviek nie je stanovená žiadna veková hranica, hoci u mladých ľudí s krátkozrakosťou sa môžu používať od 10 rokov. Nosenie kontaktných šošoviek u detí si vyžaduje pravidelné kontroly.

KLINICKÉ PRÍNOSY A VÝKONNOSŤ:

Klinická výkonnosť:

Tvrde kontaktné šošovky korigujú všetky zrakové vady, či už pravidelné (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, presbyopia) alebo nepravidelné (keratokonus, úraz atď.) tak, že udržiava určitý objem slz medzi šošovkou a rohovkou, ktorý pôsobí ako optický meniskus a je kombinovaný s ich dioptrickou silou.

Klinické prínosy:

- Zlepšenie ostrosti zraku a zorného poľa
- Optická kompenzácia bežných zrakových vád (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, presbyopia)
- Optická kompenzácia nepravidelných zrakových vád (keratokonus, nepravidelnosť rohovky, úraz...)
- Brzdzenie krátkozrakosti u detí a mladých ľudí pomocou šošoviek PRE AMYOPIC

ODPORÚČANÁ VÝMENA:

Každých 18 mesiacov.

Každých 12 mesiacov u detí a mladých.

DĹŽKA ČASU DENNÉHO NOSENIA:

Trvanie denného nosenia musí určiť lekár.

Pri prvej kontrole a adaptácii sa odporúča toto trvanie postupne predlžovať.

Po uplynutí adaptačného obdobia sa denná doba nosenia šošoviek môže pohybovať od 10 do 15 hodín denne.

Aby boli šošovky PRE AMYOPIC účinné pri znižovaní krátkozrakosti, ich minimálny odporúčaný čas nosenia je 10 alebo viac hodín denne, v závislosti od fyziologickej tolerance.

Zoznam tvrdých šošoviek Precilens s uvedením práv, možných použitých materiálov, dotknutej populácie a odporúčanej výmene získate naskenovaním QR kódu naproti.



BALENIE:

Šošovky sú zabalené v suchom puzdre. Ak je obal poškodený, šošovka sa nesmie používať.

0459 C

Uchovávajte mimo dosahu detí.



Precilens - Aktualizované v septembri 2024.
Francúzsko - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL



Precilens

TAILOR-MADE VISUAL INNOVATION

NÁVOD NA POUŽÍVANIE TVRDÝCH KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK PRECILENS

TENTO LETÁK OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ MUSÍ OČNÝ LEKÁR ALEBO OPTOMETRISTA POZNAŤ A ODOVZDAŤ ICH POUŽÍVATEĽOM KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK. PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Leták v ďalších jazykoch si môžete stiahnuť z webovej stránky www.precilens.com
Distribútori šošoviek Precilens sú povinní vytlačiť tento leták vo svojom jazyku a systematicky ho priložiť ku každej dodávanej šošovke.

Oční lekári a optometristi sú povinní poskytnúť ho používateľovi.

Other languages can be downloaded from www.precilens.com

Distributors of Precilens lenses are required to print this leaflet in their own language and enclose it with the lenses they ship.

Eye care professionals are also required to give the leaflet to the wearer.



Vysvetlivky symbolov na etikete:

	Zdravotnícka pomôcka
	Jeden pacient, viacero použití
	Názov šošovky
	Sériové číslo
	Jedinečný identifikačný kód
	Číslo modelu
	Súlad s požiadavkami na výkon a bezpečnosť a číslo notifikovaného orgánu
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Konzultácia príbalového letáku
	Dátum výroby

NASADENIE ŠOŠOVIEK:

Nasadenie (ako aj vybratie) by sa malo vykonávať nad rovným, čistým a dobre osvetleným povrchom.

Pred každou manipuláciou by ste si mali ruky umyť, opláchnuť a utrieť čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

- Na vyberanie šošoviek z puzdra nikdy nepoužívajte pinzety ani iné pomôcky.
- Ak musíte so šošovkami manipulovať nad umývadlom, uistite sa, že je odtok uzavretý.
- Aby nedošlo k zámene pravej a ľavej šošovky sa odporúča postupovať vždy v rovnakom poradí, napríklad najprv pravá šošovka a potom ľavá šošovka.
- Odporúča sa, aby ste si kontaktné šošovky nasadili po rannej hygieny a pred nanesením make-upu a aby ste ich vybrali pred večernou hygienou a odličeníem.
- Umiestnite šošovku na ukazovák.
- Na otvorenie očných viečok použite prostredník jednej a druhej ruky
- Nasadte si šošovku na oko (obrázok č. 1). Postup zopakujte aj pri druhom oku.

VYBRATIE ŠOŠOVIEK:

Vybratie (ako aj nasadenie) by sa malo vykonávať nad rovným, čistým a dobre osvetleným povrchom.

Prvá metóda

- Nakloňte hlavu nad zrkadlo položené na stole.
- Otvorte oči veľmi naširoko a pozerajte sa uprene do zrkadla, pričom hlavu mierne otočte na stranu dotknutého oka.
- Ukazovák pravej ruky položeným v spánkovom uhle pravých viečok ťahajte v jednej línii s nimi a snažte sa udržať oči otvorené (obrázok č. 2)
- Šošovka sa odlepi a spadne na zrkadlo.
- Pri ľavej šošovke postupujte rovnako.

Druhá metóda

- Majte doširoka otvorené oči, položte ukazovák jednej ruky na horné viečko k mihalniciam, ukazovák druhej ruky na dolné viečko k mihalniciam a oba ukazováky približte smerom do stredu, pričom jemným tlakom na okraj viečok spôsobíte odlepenie šošovky z oka (obrázok č. 3)



ODPORÚČANÉ PROSTRIEDKY NA ČISTENIE:

- Pre šošovky PRE Perform a PRE Amyopic: každodenná dekontaminácia roztokom na báze peroxidu vodíka.
- Pre ostatné tvrdé šošovky: multifunkčný roztok na tvrdé šošovky.

Enzymatické deproteinizačné tablety možno kombinovať s dekontaminačným roztokom raz týždenne.

STAROSTLIVOSŤ:

Upozornenia:

- Čistiace roztoky nemeňte bez konzultácie svojho očnéh lekára.
- Na čistenie šošoviek nikdy nepoužívajte vodu, fyziologický roztok ani očné kvapky na zvýšenie komfortu.

- Na čistenie šošoviek nepoužívajte sliny ani žiadne prostriedky do domácnosti.
- Po ukončení dekontaminačného cyklu roztok zlikvidujte a opätovne ho nepoužívajte.
- Po uplynutí dátumu spotreby zlikvidujte roztok, ktorý zostal vo fľaši.
- Puzdro pravidelne vymieňajte.

Šošovky je potrebné po každom vybratí vyčistiť, opláchnuť a vydezinfikovať. Na odstránenie usadenín z povrchu šošoviek je potrebné ich vyčistenie a opláchnutie. Na zničenie mikróbov a baktérií je potrebná dezinfekcia.

- Šošovky pri každom odobratí dekontaminujte.
- Čistiace roztoky spotrebujte do dátumu expirácie uvedenom na fľaši s roztokom.
- Roztoky a šošovky uchovávajte mimo dosahu zdrojov nadmerného tepla.
- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené v príbalových letákoch roztokov na šošovky.
- Pri príležitostnom prerušení nosenia šošoviek je potrebné ich uchovávať vo vhodnom roztoku.
- Ak sa šošovky dlhší čas nenosia, je potrebné ich očistiť, opláchnuť sterilným roztokom a starostlivo vysušiť jemnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a následne ich uložiť do čistého a suchého puzdra na uskladnenie. Pred ich opätovným nasadením je 24 hodín pred nosením potrebné vykonať kompletný cyklus čistenia.
- Puzdra na kontaktné šošovky čistite dekontaminačným roztokom.
- Na čistenie puzdier nikdy nepoužívajte vodu.

ODPORÚČANIA:

- Lekár vám predpísal šošovky podľa špecifických vlastností vášho oka.
- Preto nemeňte typ ani parametre kontaktných šošoviek bez toho, aby ste to s ním prekonzultovali.
- Nenasadzujte si poškodené šošovky.
- Noste so sebou okuliare vhodné pre váš zrak (pre prípad, že by ste si museli vybrať kontaktné šošovky).
- Zabráňte, aby kontaktné šošovky prišli do kontaktu s lakom na vlasy alebo inými kozmetickými sprejmi.
- Neodporúčame nosiť šošovky v prostredí s nízkou vlhkosťou vzduchu (lietadlá, helmy u kaderníka atď.)
- Tehotenstvo a niektoré lieky môžu narušiť slznú sekréciu: poraďte sa so svojím lekárom.

KONTRAINDIKÁCIE:

NEPOUŽÍVAJTE kontaktné šošovky v nasledujúcich prípadoch:

- Akútny zápal alebo infekcia prednej očnej komory.
- Choroba, poranenie alebo abnormalita, ktorá postihuje rohovku, spojovku alebo očné viečka, okrem prípadov, keď je potrebná protetická šošovka.
- Závažný nedostatok slzného sekrétu (suché oči).
- Hypestézia rohovky (znížená citlivosť rohovky), ak oči nie sú afakické.
- Systémové ochorenie, ktoré môže postihnúť oko alebo sa môže zhoršiť nosením kontaktných šošoviek.
- Alergické reakcie príľahých povrchov alebo tkanív oka, ktoré môže vyvolať alebo zhoršiť nosenie kontaktných šošoviek alebo používanie potrebných roztokov.
- Alergia na zložku čistiaceho roztoku.
- Bakteriálna, plesňová alebo vírusová infekcia rohovky.
- Začervenanie alebo podráždenie očí.

NEŽIADUCE ÚČINKY:

Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich problémov, OKAMŽITE ŠOŠOVKY VYBERTE:

- Pichanie, pálenie a svrbenie (podráždenie) alebo iné bolesti očí.
- Strata pocitu pohodlia v porovnaní s počiatočným nasadením šošovky.
- Abnormálny pocit cudzieho telesa v oku (cudzie teleso, poškrabaná oblasť).
- Nadmerné slzenie
- Začervenanie očí
- Nezvyčajné očné výtoky
- Znížená ostrosť zraku
- Rozmazané videnie, videnie dúhy alebo prstencov okolo predmetov
- Citlivosť na svetlo (fotofóbia)

Ak problém prestane po vybratí šošovky, skontrolujte šošovku:

Ak je šošovka poškodená, nesmie sa vložiť späť do oka. Umiestnite ju do puzdra a kontaktujte očnéh lekára.

Ak šošovka nie je poškodená, pred nasadením späť na oko je potrebné ju vyčistiť, opláchnuť a vydezinfikovať.

Ak problém pretrváva aj po nasadení šošovky, okamžite ju vyberte a poraďte sa so svojím očným lekárom, aby zistil príčiny tohto problému, ktoré môžu súvisieť s očnou léziou (infekcia, vred rohovky, neovaskularizácia...).

LIKVIDÁCIA ŠOŠOVIEK:

Šošovky možno zahodiť do domáceho odpadu v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

OBOZRETNOSŤ:

Každý závažný incident týkajúci sa vašich šošoviek je potrebné nahlásiť výrobcovi na adresu vigilance@precilens.com a príslušnému zdravotníckemu úradu vašej krajiny.