




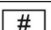
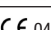



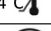


Sildil kasutatud sümbolite kirjeldus:

	Meditsiiniseade
	Ühele patsiendile mitmekordseks kasutamiseks
	Läätsede nimetus
	Seerianumber
	Kordumatu identifitseerimistunnus
	Mudeli number
	Vastavus Euroopa tervishoiu- ja ohutusnõuetele ning sertifitseeriva asutuse number
	Kasutada enne (desinfitseeriva lahuse aegumiskuupäev)
	Säilitamistemperatuuri piirväärtus
	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
	Vaadata kasutusjuhendit

LÄÄTSEDE PAIGALDAMINE

Paigaldada (ja ka eemaldada) tuleb tasase, puhta ja hästi valgustatud pinna kohal.

Enne igat käsitlemist tuleb käed pesta, loputada ja puhta, ebameeldiva lõhna eemaldamiseks kasutada.

- Läätsede eemaldamiseks konteinerist ei tohi kunagi kasutada pintsette või muid vahendeid.
- Kui peate läätsti käsitlema valamu kohal, veenduge, et äravooluava on suletud.
- Et parema ja vasaku silma läätsede mitte segamini ajada, on soovitatav alati samas järjekorras tegutseda: näiteks kõigepealt parema silma lääts ja seejärel vasaku silma lääts.
- Hommikul on soovitatav läätsed silma panna pärast pesemist ja enne meikimist ning võtta ära enne õhtust pesemist ja meigi eemaldamist.
- Asetage lääts nimetissõrmele.
- Silmalauade avamiseks kasutage mõlema käe keskmi sõrme
- Asetage lääts silmale (joonis 1). Korra sama protseduuri teise silmaga.

LÄÄTSEDE EEMALDAMINE

Eemaldada (ja ka paigaldada) tuleb tasase, puhta ja hästi valgustatud pinna kohal.

Esimene meetod

- Kallutage pea lauale horisontaalselt asetatud peegli kohale.
- Tehke silmad suurelt lahti ja vaadake peeglisse, pöörates pead veidi selle silma poole, kust soovite läätsede eemaldada.
- Tõmmake parema silma laugude oimupoolsele nurgale asetatud nimetissõrmega laugusid väljapoole, püüdes silmad suurelt avatud hoida (joonis 2)
- Lääts tuleb lahti ja kukub peeglile.
- Vasaku läätsede puhul toimige samamoodi.

Teine meetod

- Avage silmad suurelt, asetage ühe käe nimetissõrm ülemise silmalaua ripsmetega servale, teise käe nimetissõrm alumise silmalaua ripsmetega servale ja viige mõlemad nimetissõrmed keskele, avaldades silmalauade servale õrnalt survet, et lääts silmast lahti tuleks (joonis 3)



SOOVITATAVAD PUHASTUSVAHENDID

- PRE Perform ja PRE Amyopic läätsedele: vesinikperoksiidil põhinev lahustamislahus igapäevaseks desinfitseerimiseks.
 - Muudele kõvadele läätsedele: kõvade läätsede multifunktsionaalne lahustamislahus.
- Proteiinide eemaldamiseks ensümaatilisi tablette võib puhastamislahusele lisada üks kord nädalas.

HOOLDUS

Hoiatused

- Ärge vahetage hoolduslahuseid ilma ravigi teadmata.

- Ärge kunagi kasutage läätsede puhastamiseks vett, soolalahust või silmatilkasid.

- Ärge kasutage läätsede puhastamiseks sülg või majapidamistooteid.
- Pärast desinfitseerimist visake kasutatud lahustamislahus ära ja ärge seda uuesti kasutage.
- Pärast kõlblikkusaja möödumist visake pudelisse jäänud lahustamislahus ära.
- Vahetage oma läätsede konteinerit regulaarselt.

Iga kord, kui läätsed eemaldatakse, tuleb need puhastada, loputada ja desinfitseerida. Läätsede puhastamine ja loputamine on vajalik, et eemaldada nende pinnalt sadestunud jäägid. Desinfitseerimine on vajalik mikroobide ja bakterite hävitamiseks.

- Desinfitseerige oma läätsed iga kord, kui te need ära võtate.
- Hoolduslahuseid kasutage alati enne lahuse pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
- Hoidke lahustamislahust ja läätsed eemal liigse kuumuse allikatest.
- Järgige alati hoolduslahuste infolehtedes toodud juhiseid.
- Kui te läätsesid mõnda aega ei kanna, tuleb neid hoida sobivas lahustamislahuses.
- Kui läätsesid ei kanta pikemat aega, tuleb need puhastada, steriilses lahustamislahuses loputada ja pehme ebemevaba lapiga kuivatada ning seejärel puhtasse ja kuiva konteinerisse panna. 24 h enne nende uuesti kandmist tuleb teha nende täielik puhastussükkel.
- Puhastage kontaktläätsede konteinerit desinfitseeriva lahustamislahusega.
- Ärge kunagi kasutage konteineri puhastamiseks vett.

SOOVITUSED

- Ärge kandke läätsti, kui need on kahjustatud.
- Kandke kaasas teie nägemisele sobivaid prille (juhul, kui teil on vaja kontaktläätsed eemaldada)
- Ärge laske oma kontaktläätsel kokku puutuda juukselaki või muu kosmeetika spreidega.
- Läätsesid ei ole soovitatav kanda madala õhuniiskusega keskkonnas (lennukid, juuksuri kuppelfoon jne)
- Rasedus ja teatud ravimid võivad häirida pisarate sekretsiooni, rääkige sellest oma ravigi arstiga.

VASTUNÄIDUSTUSED

Kontaktläätsesid EI TOHI KASUTADA järgmistel juhtudel:

- Silma eeskambri äge põletik või infektsioon.
- Haigus, vigastus või kõrvalekalle, mis mõjutab sarvkesta, sidekesta või silmalauge, välja arvatud juhul, kui on vaja kunstläätsede.
- Pisarasekretsiooni tugev puudulikkus (silmade kuivus).
- Sarvkesta hüpoesteesia (sarvkesta vähenenud tundlikkus) mittefaasiaga silmalauadel.
- Süsteemne haigus, mis võib mõjutada silma või mida võib süvendada kontaktläätsede kandmine.
- Silmaga piirnevate kudede allergilised reaktsioonid, mida võib esile kutsuda või süvendada kontaktläätsede kandmine või nendega seotud lahustamislahuse kasutamine.
- Allergia puhastuslahuse koostisosa suhtes.
- Sarvkesta bakteriaalne, seen- või viirusinfektsioon.
- Punased või ärritunud silmad.

KÕRVALNÄHUD

EEMALDAGE KOHE LÄÄTSED, kui esineb mõni järgmistest probleemidest

- Silmade kipitus, põletustunne ja sügelus (ärritus) või muu silmavalu.
- Läätsede paigaldamise ajal olnud mugavustunde vähenemine.
- Võõrkeha tundmise tunne (võõrkeha või kriimustuse tunne) silmas.
- Rohke pisarate eritumine
- Punased silmad
- Ebatavalised silmade eritised
- Vähenenud nägemisteravus
- Ähmane nägemine, vikerkaarte või halode teke objektide ümber
- Valgustundlikkus (fotofoobia)

Kui probleem pärast läätsede eemaldamist kaob, kontrollige läätsede:

Kui lääts on kahjustatud, ei tohi seda silma tagasi panna. Pange see konteinerisse ja võtke ühendust arstiga.

Kui lääts ei ole kahjustatud, tuleb see enne silma tagasi asetamist puhastada, loputada ja desinfitseerida.

Kui probleem püsib ka pärast läätsede tagasi panemist, eemaldage see kohe ja konsulteerige oma arstiga, et selgitada välja probleemi põhjused, mis võivad olla seotud silmakahjustusega (infektsioon, sarvkesta haavand, neovaskularisatsioon...).

VAHENDI KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Läätsed võivad koos olmejäätmetega vastavalt kohalikele jäätmeärituseeskirjadele ära visata.

JÄRELEVALVE

Teie läätsedega seotud igast tõsisest vahejuhtumist tuleb teavitada tootja aadressil vigilance@preclens.com ja teie riigi pädevat tervishoiuasutust.