


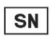









Sildil kasutatud sümbolite kirjeldus:

	Meditsiineseade
	Ühele patsiendile mitmekordseks kasutamiseks
	Läätse nimetus
	Seerianumber
	Kordumatu identifitseerimistunnus
	Mudeli number
	Vastavus Euroopa tervishoiu- ja ohutusnõuetele ning sertifitseeriva asutuse number
	Kasutada enne (steriilsuse aegumise kuupäev)
	Steriliseeritud auru abil
	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
	Vaadata kasutusjuhendit

LÄÄTSEDE PAIGALDAMINE:

Enne esmakordset kasutamist on soovitat läbi viia üks puhastussükkel.


Paigaldada (ja ka eemaldada) tuleb tasase, puhta ja hästi valgustatud pinna kohal.

Enne igat käsitlemist tuleb käed pesta, loputada ja puhta, ebemeid mitmetekitava lapiga kuivatada.

- Läätsede eemaldamiseks konteinerist ei tohi kunagi kasutada pintsette või muid vahendeid.
- Kui peate läätsesid käsitlema valamu kohal, veenduge, et äravooluava on suletud.
- Et parema ja vasaku silma lääts mitte segamini ajada, on soovitat alati samas järjekorras tegutseda: näiteks kõigepealt parema silma lääts ja seejärel vasaku silma lääts
- Hommikul on soovitat läätsed silma panna pärast pesemist ja enne meikimist ning võtta ära enne õhtust pesemist ja meigi eemaldamist.
- Asetage lääts nimetissõrmele.
- Silmalauade avamiseks kasutage mõlema käe keskmist sõrme.
- Asetage lääts silmale (joonis 1). Korrake sama protseduuri teise silmaga.

LÄÄTSEDE EEMALDAMINE:

- Vaadake üles ja tõmmake keskmise sõrmega alumine silmalaug alla.
- Eemaldage nimetissõrme ja põidla otsaga lääts ettevaatlikult silmast (joonis 2).
- Korrake sama toimingut vasaku läätsel.

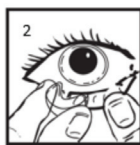

SOOVITATAVAD PUHASTUSVAHENDID:

Igapäevaseks desinfitseerimiseks vesinikperoksiidil põhinev lahus või selle puudumisel mitmeotstarbeline pehmete läätsede lahus.

Porteiinide eemaldamise ensümaatilisi tablette võib puhastamislahusele lisada üks kord nädalas.

HOOLDUS:

Hoiatused

- Ärge vahetage hoolduslahuseid ilma raviarsti teadmata.
- **Ärge kunagi kasutage läätsede puhastamiseks vett, soolalahust või silmatilkasid.**
- Ärge kasutage läätsede puhastamiseks sülgel või majapidamistooteid.
- Pärast desinfitseerimistsükli visake kasutatud lahust ära ja ärge seda uuesti kasutage.

- Pärast kõlblikkusaja möödumist visake pudelisse jäänud lahust ära.

- Vahetage oma läätskonteinerit regulaarselt.

Iga kord, kui läätsed eemaldatakse, tuleb need puhastada, loputada ja desinfitseerida.

Läätsede puhastamine ja loputamine on vajalik, et eemaldada nende pinnalt sadestunud jäägid. Desinfitseerimine on vajalik mikroobide ja bakterite hävitamiseks.

- Desinfitseerige oma läätsed iga kord, kui te need ära võtate.
- Hoolduslahuseid kasutage alati enne lahuse pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
- Hoidke lahused ja läätsed eemal liigse kuumuse allikatest.
- Järgige alati hoolduslahuste infolehtedes toodud juhiseid.
- Kui te läätsesid mõnda aega ei kanna, tuleb neid hoida üleni sobiva lahuse sees. 24 h enne nende uuesti kandmist tuleb teha nende täielik puhastussükkel.
- Puhastage kontaktläätsede konteinerit desinfitseeriva lahusega.
- **Ärge kunagi kasutage konteinerite puhastamiseks vett.**

SOOVITUSED:

- Ärge kandke läätsi, kui need on kahjustatud.
- Kandke kaasas teie nägemisele sobivaid prille (juhuks, kui teil on vaja kontaktläätsed eemaldada).
- Ärge laske oma kontaktläätsedel kokku puutuda juukselaki või muu kosmeetika spreidega.
- Läätsesid ei ole soovitatav kanda madala õhuniiskusega keskkonnas (lennukid, juuksuri kuppelfoon jne).
- Rasedus ja teatud ravimid võivad häirida pisarate sekretsiooni, rääkige sellest oma raviarstiga.

VASTUNÄIDUSTUSED:

Kontaktläätsesid EI TOHI KASUTADA järgmistel juhtudel

- Silma eeskambri äge põletik või infektsioon.
- Haigus, vigastus või kõrvalekalle, mis mõjutab sarvkesta, sidekesta või silmalauge, välja arvatud juhul, kui on vaja kunstläätsi.
- Pisarasekretsiooni tugev puudulikkus (silmade kuivus).
- Sarvkesta hüpoesteesia (sarvkesta vähenenud tundlikkus) mittefaakiaga silmadel.
- Süsteemne haigus, mis võib mõjutada silma või mida võib süvendada kontaktläätsede kandmine.
- Silmaga piirnevate kudede allergilised reaktsioonid, mida võib esile kutsuda või süvendada kontaktläätsede kandmine või nendega seotud lahuste kasutamine.
- Allergia puhastuslahuse koostisosa suhtes.
- Sarvkesta bakteriaalne, seen- või viirusinfektsioon.
- Punased või ärritunud silmad.

KÕRVALNÄHUD:

EEMALDAGE KOHE LÄÄTSED, kui esineb mõni järgmistest probleemidest

- Silmade kipitus, põletustunne ja sügelus (ärritus) või muu silmavalu.
- Läätsede paigaldamise ajal olnud mugavustunde vähenemine.
- Võõrkeha tundmise tunne (võõrkeha või kriimustuse tunne) silmas.
- Rohke pisarate eritumine
- Punased silmad
- Ebataavalised silmade eritised
- Vähenenud nägemisteravus
- Ähmane nägemine, vikerkaarte või halod teke objektide ümber
- Valgustundlikkus (fotofoobia)

Kui probleem pärast läätsi eemaldamist kaob, kontrollige läätsi

Kui lääts on kahjustatud, ei tohi seda silma tagasi panna. Pange see konteinerisse ja võtke ühendust arstiga.

Kui lääts ei ole kahjustatud, tuleb see enne silma tagasi panemist puhastada, loputada ja desinfitseerida.

Kui probleem püsib ka pärast läätsi tagasi panemist, eemaldage see kohe ja konsulteerige oma arstiga, et selgitada välja probleemi põhjused, mis võivad olla seotud silmakahjustusega (infektsioon, sarvkesta haavand, neovaskularisatsioon...).

VAHENDI KASUTUSEST KÕRVALDAMINE:

Läätsed võib koos olmejäätmetega vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele ära visata.

JÄRELEVALVE:

Teie läätsedega seotud igast tõsisest vahejuhtumist tuleb teavitada tootja aadressil vigilance@precilens.com ja teie riigi pädevat tervishoiuasutust.