

УПОЗОРЕЊА:

Контактна сочива су вишестранки медицински производи намењени за употребу код једног пацијента.

Стручњак за негу очију издаје сочива и мора Вас информисати и обучити за њихову употребу.

Проблеми повезани са ношењем контактних сочива и употребом производа за негу могу изазвати озбиљна оштећења ока. Зато је неопходно да се придржавате упутстава Вашег здравственог радника и информација из упутстава приложених уз контактна сочива и производе за негу.

Здравствени радник мора Вас информисати о следећим упутствима за ношење:

- Мека сочива „Precilens“ намењена су за ношење током дана и не смеју се носити током спавања.
- Након употребе и пре поновне употребе, уклоните контактна сочива, очистите их и дезинфикујте средствима за чишћење која Вам препоручи стручњак за негу очију.
- Придржавајте се свих заказаних прегледа код стручњака за негу очију, јер су они кључни за праћење и прилагођавање сочива.
- Никада не дозволите да контактна сочива дођу у контакт са водом из чесме.
- Никада не носите контактна сочива током купања или туширања, нити током пливања у базену или мору.
- Не носите контактна сочива ако постоји ризик од излагања опасним или иритирајућим испарењима.
- Ако осетите бол у оку, прекомерно сузење, смањену оштрину вида или црвенило ока, одмах уклоните контактна сочива и контактирајте стручњака за негу очију.

ИНДИКАЦИЈЕ:

Мека контактна сочива намењена су за ношење током дана, уз замену на свака три месеца или једном годишње, за корекцију миопије, хиперметропије, астигматизма и пресбиопије код правилних рожњача. Контактна сочива одговарају свим типовима пацијената, под условом да разумеју да је ношење сочива слично ношењу наочара, али да прилагођавање понекад може бити отежано.

Не постоји старосно ограничење за ношење контактних сочива, иако се често прописују младим особама са миопијом од десет година. Деца која носе сочива морају редовно ићи на контролне прегледе.

ПРЕДНОСТИ И КЛИНИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ:

Клиничке перформансе:

Мека контактна сочива коригују све уобичајене рефракционе грешке (миопију, хиперметропију, астигматизам, пресбиопију). Пошто се мека сочива прилагођавају централној површини рожњаче, сузни филм на том месту остаје танак и равномерне дебљине, чиме обезбеђује нулту оптичку снагу. Посебан дизајн сочива „Амуорис“, захваљујући градијенту снаге, ствара миопијски дефокус на периферној ретини, чиме контролише продужавање аксијалне дужине ока и успорава напредовање миопије.

Клиничке предности:

- Побољшана оштринина вида и видно поље
- Оптичка корекција правилних рефракционих грешака (миопије, хиперметропије, астигматизма, пресбиопије)
- Контрола миопије уз дизајн „Амуорис“ за прогресивну миопију код деце и младих особа са миопијом млађих од 20 година

ПРЕПОРУЧЕНА ЗАМЕНА:

На свака три месеца или једном годишње, у зависности од сочива.

ДНЕВНО ВРЕМЕ НОШЕЊА:

Стручњак за негу очију одређује дневно време ношења сочива.

Током почетног прилагођавања препоручује се постепено повећавање времена ношења.

Након периода адаптације, дневно време ношења сочива може износити од 10 до 15 сати дневно.

Списак меких контактних сочива „Precilens“, укључујући намену, могуће материјале, циљну популацију и препоручени распоред замене, можете погледати скенирањем QR кода испод:



ПАКОВАЊЕ:

Сочива се пакују у стерилну бочицу која садржи физиолошки раствор. Бочица има заштиту од неовлашћеног отварања до првог отварања. Ако је паковање оштећено, не користите сочива.

© 045

Чувати ван домета деце.

Акцрррррррррррррррр

„PRECILENS“ - 25 rue Auguste Perret - 94000 Creteil - Француска



L'INNOVATION VISUELLE SUR MESURE

Упутство за употребу меких сочива „Precilens“

ОВО УПУТСТВО САДРЖИ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СТРУЧЊАЦИ ЗА НЕГУ ОЧИЈУ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ И ДА ПОДЕЛЕ СА КОРИСНИЦИМА. ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ.

Верзије на осталим језицима могу се преузети са веб-локације www.precilens.com (QR код испод)

Дистрибутери сочива „Precilens“ морају одштампати ово упутство на свом језику и приложити га уз сочива која испоручују.

Стручњаци за негу очију такође морају предати ово упутство кориснику.

Верзије на осталим језицима могу се преузети са веб-локације




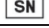








www.precilens.com (QR код испод)

Дистрибутери сочива „Precilens“ морају одштампати ово упутство на свом језику и приложити га уз сочива која испоручују.

Стручњаци за негу очију такође морају предати ово упутство кориснику.

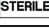

Опис симбола који се користе на етикети:

	Медицински производ
	Један пацијент, виšekратна употреба
	Назив сочива
	Серијски број
	UDI (јединствена идентификација медицинског производа): јединствени идентификациони код
	Број модела
	Европска усаглашеност са захтевима за здравље и безбедност и број сертификационог тела
	Употребити до (рок трајања стерилности)
	Стерилизација паром
	Јединствени стерилни баријерни систем
	Датум производње
	Не користити ако је паковање оштећено
	Погледајте упутство

СТАВЉАЊЕ СОЧИВА:

Пре прве употребе, препоручује се да извршите циклус чишћења. Сочива убацујте (као и што их уклањате) на равной, чистој и добро осветљеној површини.

Пре сваког руковања, оперите руке, исперите их и осушите чистом крпом без длачица.

- Никада не користите пинцету или друге инструменте за вађење сочива из кутијице.

- Ако рукујете сочивима изнад судопере, затворите одвод.

- Да бисте избегли забуну између десног и левог сочива, увек пратите исти редослед: на пример, прво десно сочиво, затим лево.

- Препоручује се да сочива стављате након јутарње рутине, пре nanoшења шминке, а да их уклањате пре вечерње рутине и уклањања шминке.

- Ставите сочиво на кажипрст.

- Средњим прстима једне и друге руке отворите капке.

- Поставите сочиво на око (слика 1). Поновите поступак за друго око.

УКЛАЊАЊЕ СОЧИВА:

- Погледајте нагоре и повуците доњи капак надоле средњим прстом.

- Пажљиво уклоните сочиво са ока врховима кажипрста и палца (слика 2).

- Поновите исти поступак за лево сочиво.



ПРЕПОРУЧЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА НЕГУ:

Раствор на бази водоник-пероксида за свакодневну дезинфекцију или, ако га нема, вишенаменски раствор за мека сочива.

Ензимске таблете за уклањање протеина можете користити једном недељно као допуну раствору за дезинфекцију.

ОДРЖАВАЊЕ:

Упозорења:

- Не мењајте растворе за негу сочива без консултације са стручњаком за негу очију.

- **Никада не користите воду, физиолошки раствор или капи за удобност за чишћење сочива.**

- Не користите пљувачку нити било каква средства за чишћење у домаћинству за чишћење сочива.

- Након циклуса дезинфекције, просите раствор и не користите га поново.

- Баците сав преостали раствор у бочици након истека рока трајања.

- Редовно мењајте кутијицу за сочива.

Сочива морате очистити, испрати и дезинфиковати сваки пут када их уклоните. Чишћење и испирање сочива уклања наслагe које се накупљају на њиховој површини. Дезинфекција уништава клице и бактерије.

- Дезинфикујте сочива сваки пут када их уклоните.

- Увек користите растворе за негу сочива пре истека рока трајања наведеног на бочици.

- Држите растворе и сочива даље од извора прекомерне топлоте.

- Увек пратите упутства са паковања раствора за негу сочива.

- Када не носите сочива, држите их потпуно уроњена у одговарајући раствор. Пре поновног стављања, извршите потпун циклус чишћења 24 сата пре ношења.

- Чистите кутијице за сочива раствором за дезинфекцију.

- **Никада не користите воду за чишћење кутијица.**

ПРЕПОРУКЕ:

- Стручњак за негу очију Вам је прописао контактна сочива на основу специфичних карактеристика Вашег ока. Не мењајте тип или параметре контактних сочива без консултације са њим.

- Не носите контактна сочива ако су оштећена.

- Увек носите са собом наочаре (за случај да морате уклонити сочива).

- Не дозволите да контактна сочива дођу у контакт са лаком за косу или другим козметичким аеросолима.

- Не препоручује се ношење контактних сочива у условима ниске влажности (авиони, фенови за косу итд).

- Трудноћа и одређени лекови могу пореметити лучење суза: обратите се стручњаку за негу очију.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ:

НЕ КОРИСТИТЕ контактна сочива у следећим случајевима:

• Акутна упала или инфекција предњег дела ока.

• Болест, повреда или абнормалност која захвата рожњачу, коњунктиву или капке, осим

ако је потребно протетско сочиво.

• Хронични недостатак суза (суво око).

• Хипоестезија рожњаче (смањена осетљивост рожњаче), осим ако око није афакично.

• Системска болест која може утицати на око или се може погоршати ношењем контактних сочива.

• Алергијске реакције површина или ткива око ока које могу настати или се погоршати ношењем

контактних сочива или употребом одговарајућих раствора.

• Алергија на неки састојак раствора за негу сочива.

• Бактеријска, гљивична или вирусна инфекција рожњаче.

• Црвене или иритиране очи.

НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:

ОДМАХ УКЛОНИТЕ СОЧИВА ако се појави било који од следећих проблема:

- пецкање, жарење, свраб (иритација) или други бол у оку

- губитак удобности у односу на тренутак стављања сочива

- неубичајен осећај страног тела у оку (страно тело, огреботина)

- прекомерно сузење

- црвене очи

- неубичајен секрет из ока

- смањена оштрина вида

- замућен вид, појава дугиних боја или ореола око предмета

- осетљивост на светлост (фотофобија)

Ако проблем нестане након уклањања сочива, проверите сочиво:

Ако је сочиво оштећено, не враћајте га у око. Ставите га у кутијицу и контактирајте стручњака за негу очију.

Ако сочиво није оштећено, очистите га, исперите и дезинфикујте пре него што га поново ставите у око.

Ако се проблем настави након поновног стављања сочива, одмах га уклоните и обратите се стручњаку за негу очију како бисте утврдили узрок проблема, који може бити повезан са повредом ока (инфекција, улкус рожњаче, неоваскуларизација итд).

ОДЛАГАЊЕ ПРОИЗВОДА:

Сочива можете одложити са кућним отпадом у складу са локалним прописима о управљању отпадом.

ОПРЕЗ:

Сваки озбиљан инцидент повезан са сочивима пријавите произвођачу на адресу е-поште vigilance@precilens.com као и надлежном здравственом органу у Вашој земљи.