


C&F V2

Importer sa topographie
Avec le Topcon Myah




Topcon Myah

- Ouvrir la topographie souhaitée et cliquer sur  pour sélectionner le format du fichier exporté en **XML** et cliquer sur Exporter.

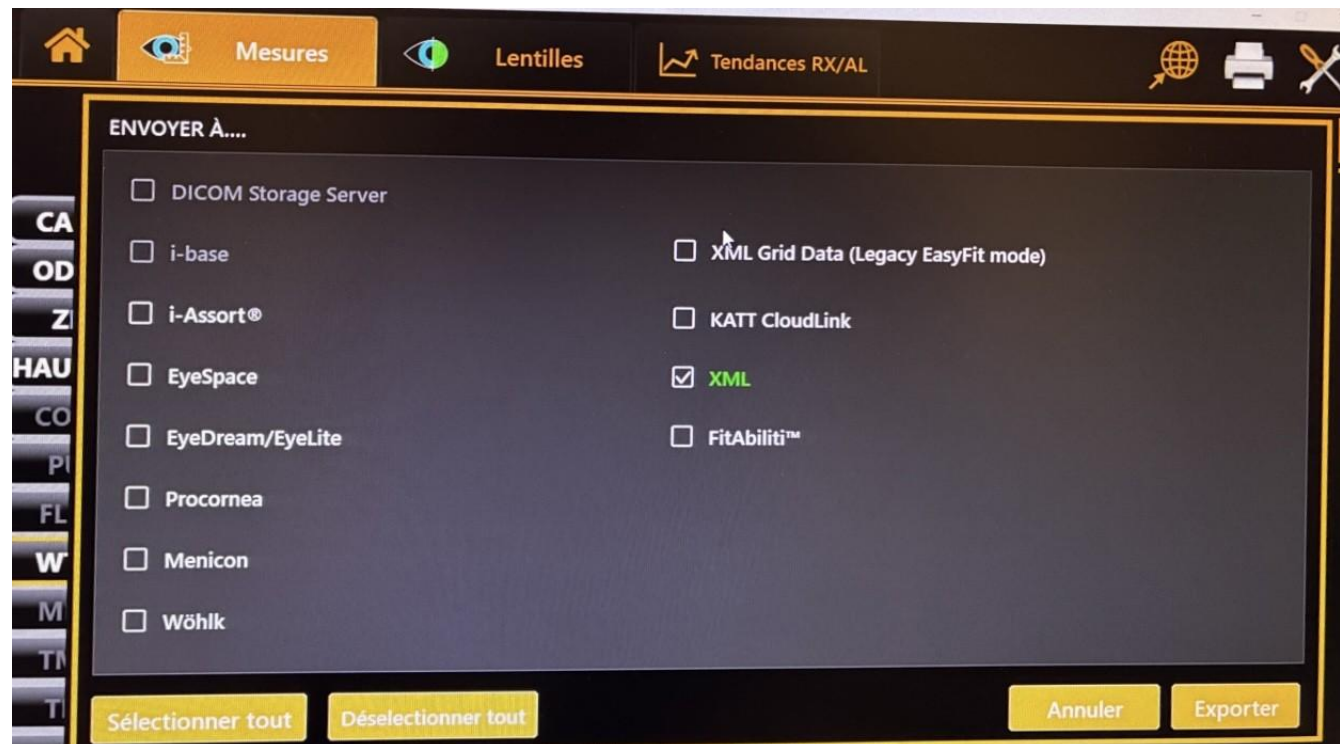

Topcon Myah

- Cette fenêtre s'ouvre
- Sélectionner Local Folder
- Puis le dossier dans lequel l'export va s'enregistrer
- Puis cliquer sur Exporter

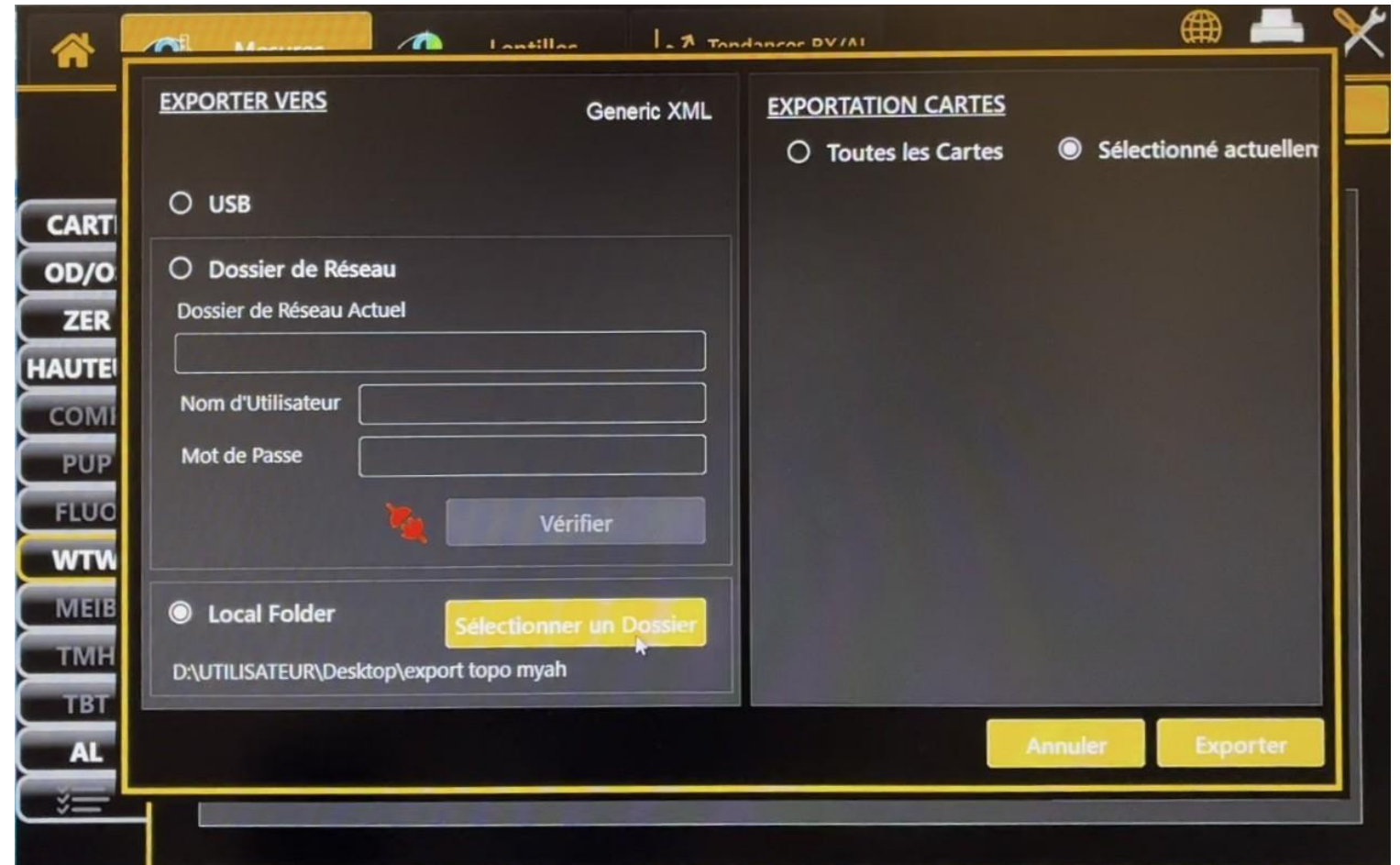

Topcon Myah

Kératométrie

Unité d'affichage
☒ Millimètres ☐ Dioptries

Modèle de topographe utilisé
-

K plat

Exc plat

Axe (f)

0,5

K serré

Exc serré

Div à 30°

0,5

K moyen : 0.00

Topographie





Sauvegarder & importer une topographie pour l'Œil droit

Choix du topographe*
Myah

Attention, dans le cas d'une cornée pathologique : Ne pas utiliser la fonction de nettoyage des données.

☒ Nettoyer la topographie

Pour le Myah, un fichier *.xml est attendu

Sélectionnez le(s) fichier(s)
ou glissez-déposez ici

Annuler

Importer 

- Dans le dossier C&F du porteur, cliquer sur le symbole : 
- Glisser les fichiers précédemment enregistrés dans l'encadrement qui s'affiche et cliquer sur 

click.fit@precilens.com