

Solution de nettoyage **PRECILENS PRONET.**

Cette solution permet un nettoyage en douceur de tous les types usuels de lentilles de contact rigides perméables aux gaz ou de lentilles de contact souples hydrophiles. On ne connaît à ce jour aucun type de lentilles de contact pour lequel cette solution ne doit pas être utilisée.

Précautions :

Afin d'éviter les complications dans le système oeil-lentille de contact, les produits d'entretien pour lentilles de contact ne doivent être utilisés qu'après avoir consulté un spécialiste en contactologie et toujours en fonction du matériau des lentilles. Le port de lentilles de contact mal nettoyées ou endommagées peut entraîner de sérieuses lésions oculaires ou même conduire à une altération de la vue. Dans le cas d'une rougeur de la conjonctive ou de la surface de l'œil dans la zone de contact de la lentille, veuillez immédiatement consulter votre ophtalmologue ou spécialiste en lentilles de contact. Les incidents graves doivent être signalés au fabricant et à l'autorité nationale.

Indications d'emploi particulières :

-  Évitez tout contact de la solution de nettoyage PRONET avec les yeux.
- Si la solution de nettoyage PRONET est entrée en contact avec l'œil, rincer celui-ci avec une solution saline; en cas d'irritation persistante, contacter l'ophtalmologue et/ou le spécialiste en lentilles de contact.
- Ne pas utiliser un flacon ouvert au-delà de 60 jours (noter la date du premier usage sur le flacon). Lorsqu'un flacon est entamé depuis 60 jours, la solution restante doit être recyclée de façon appropriée.
- Ne pas utiliser un flacon dont le capuchon original est endommagé.
- Conserver le produit à température ambiante (15 à 25 °C), à l'abri de la lumière.
- Respecter les mesures générales d'hygiène telles que le lavage des mains avant l'entretien des lentilles.
- Afin d'éviter une infection microbienne éventuelle, il est important de ne jamais toucher la pointe du bec verseur du flacon.
- Maintenir le flacon toujours bien fermé et le refermer immédiatement après chaque usage.
- Conserver ce produit hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser cette solution pour la conservation des lentilles de contact!
- N'utilisez que les produits d'entretien et les boîtiers de conservation recommandés par votre adaptateur de lentilles de contact.
- Ne pas transvaser ni mélanger à d'autres solutions.
- Ne plus utiliser après la date de péremption.

Mode d'emploi :

Les instructions ci-dessous doivent être suivies scrupuleusement :

1. Lavez vos mains soigneusement et séchez-les avec une serviette propre. N'utilisez pas un savon surgras ou liporestituant.
2. Déposez quelques gouttes (5 à 8 environ) de solution de nettoyage PRONET sur les deux faces de la lentille de contact.
 - Lentilles de contact rigides perméables aux gaz : masser la lentille entre l'index, le majeur et le pouce pendant 20 à 30 secondes.
 - Lentilles de contact souples hydrophiles : dans le creux de la main, nettoyer chacune des deux faces de la lentille avec l'index de l'autre main pendant 20 à 30 secondes.
3. Avec une solution de rinçage appropriée pour votre type de lentilles de contact ou avec une solution saline stérile, rincez la lentille pour en éliminer les restes de solution de nettoyage et les impuretés dissoutes.
 - Les lentilles de contact rigides perméables aux gaz peuvent être remises en place dans l'œil immédiatement après avoir été bien rincées.
 - Les lentilles de contact hydrophiles souples doivent être conservées pendant 1 à 2 heures dans une solution de conservation appropriée avant d'être remises en place dans l'œil.
4. Les lentilles de contact nettoyées doivent être conservées dans une solution appropriée dans leur étui de sécurité.
5. Avant de poser les lentilles de contact, rincez-les à nouveau avec une solution de rinçage appropriée ou avec une solution saline stérile.
Aucun effet indésirable n'a été observé à ce jour avec la solution de nettoyage PRONET dans le cadre d'une utilisation correcte.

Composition :

Dinatrii edetas, hydroxythylcellulosum, alcohol isopropylicus 20%, conservans : E200 0.25%, excip. ad sol. Emballage disponible: 30 ml
Le contenu peut être éliminé avec les déchets ménagers.

PRECILENS PRONET Reinigungslösung.

Diese Reinigungslösung eignet sich für die schonende Reinigung aller gängigen Typen von gasdurchlässigen formstabilen sowie weichen hydrophilen Contactlinsen. Es sind bis heute keine Linsentypen bekannt, an denen die Lösung nicht angewendet werden sollte. Schwerwiegende Vorkommnisse müssen dem Hersteller und der nationalen Behörde gemeldet werden.

Warnhinweise:

Um Komplikationen im System Auge/Contactlinse zu vermeiden, sollten Contactlinsen Pflegeprodukte nur nach vorheriger Beratung mit einem Contactlinsenspezialisten und unter Berücksichtigung des verwendeten Linsenmaterials angewendet werden. Das Tragen unvollständig gereinigter oder beschädigter Contactlinsen kann zu schweren Schädigungen des Auges oder des Sehvermögens führen. Im Falle einer Rötung des Auges im Auflagebereich der Contactlinse oder der Bindehaut sollte unverzüglich der Augenarzt oder ein Contactlinsen-Spezialist aufgesucht werden.

Spezielle Anwendungshinweise:

-  Vermeiden Sie den Kontakt der Reinigungslösung PRONET mit den Augen.
- Sollte die Reinigungslösung Pronet an das Auge gelangen, dieses mit Kochsalzlösung ausspülen und bei nachhaltiger Irritation den Contactlinsen-Spezialisten und/oder Augenarzt aufsuchen.
- Nach dem erstmaligen Öffnen des Behältnisses darf die Lösung nicht länger als 60 Tage verwendet werden (notieren Sie sich auf der Flasche das Datum des Anbruchs). Eventuell nach 60 Tagen den verbleibenden Restinhalt fachgerecht entsorgen.
- Flasche nicht verwenden, wenn der Originalitätsverschluss beschädigt ist.
- Lösung bei Zimmertemperatur (15-25 °C) und vor Licht geschützt aufbewahren.
- Allgemeine Hygienemassnahmen wie Händewaschen vor der Linsenpflege beachten.
- Um eine mögliche mikrobielle Verunreinigung der Lösung zu vermeiden, sollte die Tropferspitze der Flasche nicht berührt werden.
- Flasche nach Gebrauch sofort verschliessen und immer gut verschlossen halten.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Lösung nicht zur Aufbewahrung von Contactlinsen verwenden!
- Nur die von Ihrem Contactlinsenadapter empfohlenen Pflegemittel und Aufbewahrungsbehälter verwenden.
- Die Lösung nicht umfüllen oder mit anderen Lösungen mischen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Gebrauchsanweisung:

Die folgenden Hinweise sind sorgfältig zu befolgen:

1. Hände gründlich waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Keine rückfettenden Seifen verwenden.
2. Einige Tropfen (ca. 5–8) Reinigungslösung PRONET auf beide Seiten der Contactlinse geben.
 - Gasdurchlässige, formstabile Contactlinsen: 20–30 Sekunden zwischen Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen massieren.
 - Hydrophile weiche Contactlinsen: Beidseitig auf der Handinnenfläche mit Hilfe des Zeigefingers der anderen Hand 20–30 Sekunden reinigen.
3. Den gelösten Schmutz und die Reinigungslösung mit einer für Ihren Linsentyp geeigneten Abspülung oder sterilen Kochsalzlösung gründlich abspülen.
 - Gasdurchlässige, flexible Contactlinsen können nach dem gründlichen Abspülen sofort aufgesetzt werden.
 - Hydrophile weiche Contactlinsen sollten vor dem Aufsetzen 1–2 Stunden in einer geeigneten Aufbewahrungslösung eingelagert werden.
4. Die gereinigten Contactlinsen im Aufbewahrungsbehälter in einer Aufbewahrungslösung aufbewahren.
5. Vor dem Aufsetzen der Contactlinsen nochmals mit einer geeigneten Abspülung oder sterilen Kochsalzlösung abspülen.
Für die Reinigungslösung PRONET sind bei vorschriftsmässiger Anwendung bisher keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Zusammensetzung:

Dinatrii edetas, hydroxythylcellulosum, alcohol isopropylicus 20%, conservans: E200 0.25%, excip. ad sol. Packungsgrösse: 30 ml
Inhalt kann im Hausmüll entsorgt werden.