
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN ORTHOKÉRATOLOGIE



Du contrôle de la myopie à la presbytie :

- UNE GÉOMÉTRIE INNOVANTE ET BREVETÉE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
- Double réservoir de larmes
- Géométrie du 1^{er} réservoir et zone optique spécifiques à chaque lentille
 - Myopie jusqu'à -7.00D
 - Astigmatisme jusqu'à -4.00D
 - Hypermétropie jusqu'à +4.00D
 - Presbytie jusqu'à +3.00D d'addition

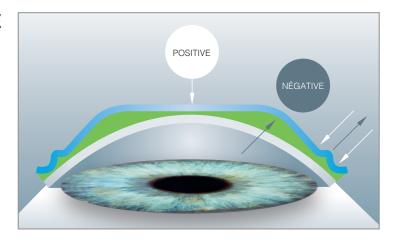



ENFANTS & JEUNES

Un contrôle optimal de la myopie

■ UN TRAITEMENT PERSONNALISÉ

- 1er réservoir de larmes (anneau rouge sur les topographies)
 - Génère une puissance positive liée à la valeur de la myopie, provoquant une défocalisation myopique (image rétinienne en avant de la rétine), permettant de contrôler l'évolution de la myopie
- Zone optique adaptée selon la myopie
 - Zone d'addition plus proche du centre de l'aire pupillaire
- Double réservoir
 - Meilleur centrage et efficacité de traitement renforcée

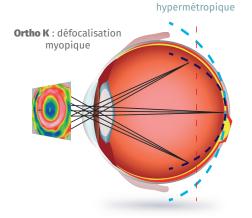


Image rétinienne périphérique selon l'équipement optique

Lunettes: défocalisation


■ DEUX DESIGNS UNIQUES tenant compte du niveau de myopie

 DRL PREVENTION dédié aux faibles myopies (enfants jusqu'a 16 ans)

Myopia Active Care (MAC):

Système unique de prise en charge des faibles myopies qui accroît la défocalisation myopique nécessaire pour les myopies ≤ 4.00 D*


- Design spécifique du 1^{er} réservoir pour une clairance augmentée
- Augmente la puissance positive générée
- Renforce l'effet freinateur
- Zone optique personnalisée optimisée (< 5 mm)
- Intégralité de la zone de défocalisation dans l'aire pupillaire
- Puissance positive périphérique plus importante

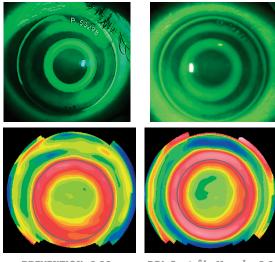


PREVENTION -2.00 Zone de défocalisation dans l'aire pupillaire

DRL Contrôle Myopie -2.00 Zone de défocalisation rapprochée de l'aire pupillaire

- DRL Contrôle Myopie dédié aux myopies jusqu'à -7.00D* (enfants et jeunes)
- 1er réservoir de larmes ajusté à la correction
 - La puissance positive générée par la myopie crée une défocalisation suffisante
- Zone optique personnalisée (5 mm)
 - Zone de défocalisation rapprochée de l'aire pupillaire

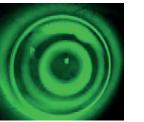

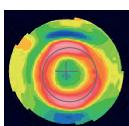


DRL Contrôle Myopie -5.00

ADULTES & PRESBYTIE


Une liberté de vision retrouvée


SIX DESIGNS pour répondre à tous les besoins visuels

- Profondeur de champ naturelle grâce à DRL (Figures 1 et 2)
- Vision aménagée avec une zone optique optimisée augmentant les aberrations pour améliorer la profondeur de champ

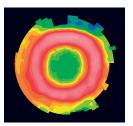



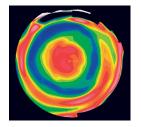

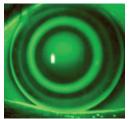

(1) DRLM: VL centrale et VP périphérique

(2) DRLH: VP centrale et VL périphérique

MYOPIE avec ou sans astigmatisme	DRLM / DRLT
MYOPIE + PRESBYTIE avec ou sans astigmatisme	DRLM / DRLT sur l'oeil préféré VL DRLM Near / DRLT Near sur l'oeil préféré VP - Ajustement de la taille de la zone optique pour optimiser la VP sur la gamme Near. - Comparable à une lentille progressive à VL centrale.
HYPERMÉTROPIE avec ou sans astigmatisme	 DRLH La profondeur de champ (aberrations) créée par le remodelage procure naturellement une addition de la moitié de la correction VL. Comparable à une lentille progressive à VP centrale.
HYPERMÉTROPIE + PRESBYTIE avec ou sans astigmatisme	DRLH sur l'œil préféré VL DRLH Near sur l'oeil préféré VP - Dans le cas d'une addition réfractive supérieure à la moitié de l'hypermétropie à corriger Comparable à une lentille progressive à VP centrale.


CORRECTION DE LA PRESBYTIE EN DRL/ DRL NEAR

Œil préféré VL : le design DRL corrige la VL et génère naturellement une profondeur de champ pour une VI confortable

Œil préféré VP: le design DRL Near, spécifique pour corriger la VP, procure également une VI confortable grâce à la profondeur de champ

Protocole d'adaptation:

- Réfraction subjective maximum convexe
- Addition lunettes
- Détermination de l'œil préféré VP (œil le moins gêné par un verre de +0,75D sur la correction VL)
- Envoyer à <u>technique@precilens.com</u> :
 - Les paramètres DRL calculés par Click & Fit + Add lunettes + œil préféré VP ou VL
 - Ou l'ensemble de vos examens

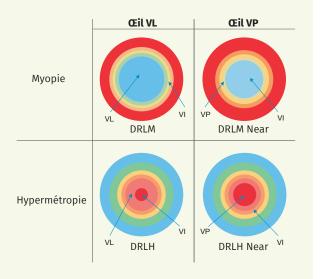

GAMME DRL°: un savoir-faire unique en ORTHO-K

	ENFANT ET JEUNE	ADULTE ET PRESBYTE
Intérêt de l'Ortho-K	 Prévention et contrôle de l'évolution de la myopie Port des lentilles dans un environnement contrôlé et sécuritaire (domicile) Possibilité de pratiquer des activités sportives 	 Liberté: vision naturelle à toutes les distances Amélioration de la profondeur de champ Confort supérieur à un port diurne de lentilles Pas de sécheresse oculaire
Indications	 Progression myopique Risque d'apparition ou risque de progression myopique Activités sportives (notamment aquatique) 	 Activités sportives Utilisation prolongée d'écran Porteurs de lentilles souples insatisfaits Yeux secs (hors syndrome de l'œil sec) Contre-indication à la chirurgie réfractive Professions nécessitant une bonne acuité visuelle sans compensation
Contre-indications	 Non-engagement des parents ou de l'enfant Manque d'hygiène Cycles de sommeil irréguliers Pathologie oculaire, maladie systémique Astigmatisme interne ≥ 0.75D 	 Diamètre pupillaire > 4 mm Manque d'hygiène Cycles de sommeil irréguliers Pathologie oculaire, maladie systémique Astigmatisme interne ≥ 0.75D
Matériaux disponibles	Optimum 100 (1ère intention) et 125 - Boston XO et XO2 Teintes de manipulation : OD Violet/ OG Bleu	
À savoir	 Importance du respect des protocoles de pose, retrait, entretien Temps d'adaptation chez l'adulte (10 jours chez le myope,15 jours à 3 semaines chez l'astigmate et l'hypermétrope) Possibilité de halos chez l'adulte au début du traitement 	

COMMANDE DES LENTILLES:

- Logiciel Click & Fit
 - Pour la presbytie, ajouter manuellement sur le BdC : Add lunettes + œil préféré VP ou VL
- technique@precilens.com
 <u>Données indispensables</u>:
 Se référer aux fiches techniques téléchargeables dans l'espace professionnel du site www.precilens.com

Service urgence perte ou casse:

Fabrication prioritaire **01 45 13 18 45** avec le n° de traçabilité de la lentille





ENTRETIEN:

- PACK ORTHO-K 1^{er} Pas
 Offert aux porteurs pour le 1^{er} mois d'essai en lentilles DRL*
 1 flacon OXYClean / 1 boîte de 30 doses AQUADROP+ / 1 ventouse
- PACK ORTHO-K 3 mois pour les porteurs confirmés Disponible à l'unité chez tous les opticiens
 - 2 flacons OXYClean / 3 boites de 30 doses AQUADROP+ / 1 boîte de ProCare

*Offre à valeur d'échantillon et non contractuelle.

Aides à l'adaptation et vidéos de manipulation sur www.precilens.com et www.lentilledenuit.com

Assistance technique:

Tél. +33 (0)1 45 13 18 45 - E-mail: technique@precilens.com

