

תיאור הסמלים בהם נעשה שימוש בתווית:

	התקן רפואי
	מטופל אחד, שימושים מרובים
	שם העדשה
	מספר סידורי
	קוד UDI: קוד זיהוי ייחודי
	מספר דגם
	עמידה בדרישות התקנות האירופאיות לבריאות ובטיחות ומספר הגוף המאשר
	לשימוש עד (תאריך תפוגה של תמיסת הטיהור)
	מגבלת טמפרטורת אחסון 25°C / 4°C
	אין להשתמש אם האריזה פגומה
	יש לעיין בהוראות השימוש

הרכבת העדשות:


מומלץ להרכיב את העדשות לאחר רחצת הערב והסרת האיפור, רגע לפני השינה. ההרכבה (וכן ההסרה) חייבת להיעשות מעל משטח שטוח, נקי ומואר, תוך היעדרות במראה המונחת שטוחה על השולחן. למשל קודם העדשה הימנית ואז העדשה השמאלית. לפני כל טיפול, יש לסבן ידיים, לשתוף אותן ולאחר מכן לנגב במגבת נקייה ונטולת ס'בים.

- לעולם אין להשתמש בפינצטה או במכשירים אחרים כדי להסיר עדשות מהמארז.
 - על מנת למנוע כל בלבול בין העדשה הימנית לעדשה השמאלית, רצוי להתנהל תמיד באותו סדר: למשל קודם העדשה הימנית ואז העדשה השמאלית.
 - יש להניח את העדשה על האצבע המורה, ולמלא אותה בטיפת תמיסת נוחות (איור 1).
 - יש להטות את הראש מעל מראה המונחת על המשטח.
 - השתמשו באצבע האמצעית של יד אחת ובאצבע האמצעית של היד השנייה כדי לפתוח את העפעפיים.
 - הניחו את העדשה על העין (איור 2). יש לחזור על הליך זה עבור העין השנייה.

הסרת העדשות:

מומלץ להסיר את העדשות לפני רחצת הבוקר והאיפור. 20 דקות לפני ההסרה, יש לטפטף טיפה של תמיסת נוחות ללא חומרים משמרים לכל אחת מהעיניים.

ההסרה (וכן ההרכבה) צריכה להיעשות מעל משטח שטוח, נקי ומואר תוך היעדרות במראה המונחת שטוחה על המשטח.
 - יש להטות את הראש מעל המראה.
 - בעיניים פקוחות לרווחה, הניחו את האצבע המורה של יד אחת על העפעף העליון בקצה הריסים, ואת האצבע המורה של היד השנייה על העפעף התחתון בקצה הריסים,
 - כעת הצמידו יחד את שתי האצבעות והפעילו לחץ קל כדי להרים את העדשה (איור 3).

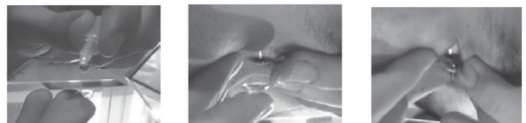

מוצרי טיפוח מומלצים:

- טיפות נוחות נטולות חומרים משמרים וללא דמעות מלאכותיות, להרכבה והסרה של עדשות.
 - תמיסה על בסיס מי חמצן לטיהור יומיומי.
 - טבילות אנזימטיות להסרת חלבונים, לשילוב פעם בשבוע עם תמיסת הטיהור.

**תחזוקה:
אזהרות:**

- אין להחליף פתרונות תחזוקה ללא התייעצות עם הרופא.

- לעולם אין להשתמש במים, בתמיסת מלח או בטיפות נוחות כדי לנקות את העדשות.
- אין להשתמש ברוק או בכל מוצר ביתי כדי לטפל בעדשות.
- לאחר מחזור הטיהור, יש להשליך את התמיסה ואין לעשות בה שימוש חוזר.
- לאחר חלוף תאריך התפוגה יש להשליך כל תמיסה שנותרה בבקבוקון.
- יש להחליף את מחסנית העדשות באופן קבוע.
- יש לנקות, לשתוף ולחטא את העדשות בכל הסרה. יש צורך בניקוי ושטיפה של העדשות כדי להסיר את המשקעים שהצטברו על פני השטח שלהן. חיטוי נדרש להשמדת חיידקים ובקטריות.
- יש לטהר את העדשות בכל פעם שמסירים אותן.
- יש להשתמש תמיד בתמיסת תחזוקה לפני תאריך התפוגה המודפס על הבקבוק.
- יש להרחיק תמיסות ועדשות ממקורות חום גבוה.
- יש לפעול תמיד לפי ההוראות המופיעות בעלוני המצורפים לאריזת תמיסות הניקוי.
- כאשר לא מרכיבים את העדשות: יש לנקות את העדשות, לשתוף בתמיסה סטרילית ולייבש בזהירות במטלית רכה נטולת ס'בים לפני שמכניסים אותן למחסנית אחסון נקייה ויבשה. לפני שחוזרים להרכיב אותן, יש צורך לבצע מחזור ניקוי מלא 24 שעות לפני ההרכבה.
- מחסניות עדשות מגע יש לנקות באמצעות תמיסת טיהור.
- לעולם אין להשתמש במים לניקוי המחסניות.

המלצות:

- אין להרכיב את העדשות אם הן פגומות.
- אם מפסיקים להרכיב את העדשות למשך שבוע או יותר, מומלץ לקבוע תור לרופא המומחה שלכם.
- אין לאפשר מגע בין עדשות המגע לספריי לשיער או תרסיסים קוסמטיים אחרים הרכבת עדשות אינה מומלצת בסביבה בעלת לחות נמוכה (כגון במטוס) -הריזו ותרופות מסוימות עלולים לשבש את הפרשת הדמעות: במצב זה יש להתייעץ עם הרופא.

התוויות נגד:

- אין להשתמש בעדשות מגע במקרים הבאים:
 - דלקת חריפה או זיהום במדור הקדמי של העין.
 - מחלה, פציעה או חריגה המשפיעה על הקרנית, הלחמית או העפעפיים, למעט כאשר נדרשת עדשה תותבת.
 - מחסור חמור בהפרשת הדמעות (עיניים יבשות).
 - היפו-אסתזיה של הקרנית (ירידה ברגישות הקרנית), אם לא מדובר באפקיה (היעדר העדשה הטבעית בעין).
 - מחלה מערכתית שעלולה להשפיע על העין או שעלולה להחמיר על ידי הרכבת עדשות מגע.
 - תגובות אלרגיות של אזורים או רקמות סמוכים לעין שעלולות להיגרם או להחמיר על ידי הרכבת עדשות מגע או שימוש בתמיסות לעדשות מגע.
 - אלרגיה למרכיב בתמיסת הניקוי
 - זיהום חיידקי, פטרייתי או ויראלי בקרנית.
 - עיניים אדומות או מגורות.

תופעות לוואי:

- נוכחות של הילות זוהרות, הנפוצות בתחילת הרכבת עדשות אורתוקרטולוגיות, יכולה להימשך עד 3 חודשים. תופעה זו אינה מונעת הרכבת עדשות מגע אך הופכת נהיגה לילית לבלתי רצויה.
- יש להסיר את העדשות באופן מיידי אם מתרחשת אחת הבעיות הבאות:
 - עקצוץ, צריבה וגרד (ג'ירוי), או כאבי עיניים אחרים.
 - אובדן נוחות בהשוואה להחדרה הראשונית של העדשה.
 - תחושה לא תקינה של גוף זר בעין (גוף זר, אזור שרט).
 - דמע מופרז
 - עיניים אדומות
 - הפרשות חריגות מהעיניים,
 - ירידה בחדות הראייה
 - ראייה מטושטשת, קשתות צבעוניות או הילות המופיעות סביב חפצים
 - רגישות לאור (פוטופוביה)

אם הבעיה נפסקת לאחר הסרת העדשה, יש לבדוק את העדשה: אם העדשה פגומה, אין להחזיר אותה לעין. יש להניח אותה במחסנית ולפנות לרופא. אם העדשה אינה פגומה, יש לנקות, לשתוף ולחטא אותה לפני שמחזירים אותה לעין.

אם הבעיה נמשכת לאחר החזרת העדשה, יש להסיר אותה מיד ולהתייעץ עם הרופא כדי לזהות את הגורמים לבעיה זו, העלולים להיות קשורים לנגע עיני (זיהום, כיב בקרנית, ניאוסוקולריזציה וכד').

סילוק המוצר:

ניתן להשליך עדשות עם האשפה הביתית בהתאם לתקנות ניהול הפסולת המקומיות.

שימו לב:

על כל תקרית חמורה המתרחשת בקשר לעדשות יש להודיע ליצרן בכתובת vigilance@preclens.com ולרשות הבריאות המוסמכת במדינתך.